


Porte I/O

Il Monitor di Grado Medicale a Batteria ha un set completo di porte I/O. Le seguenti porte sono posizionate lungo il bordo posteriore inferiore dell'unità


Fronte



Retro

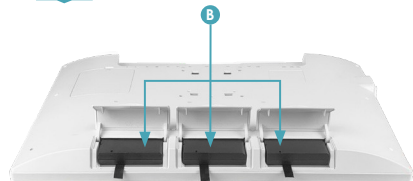

Pulsanti

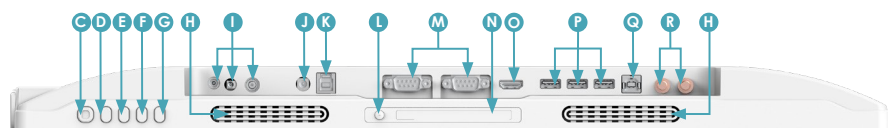

A USB 2.0	J Entrata DC
B Battery pack (opzionale)	K Entrata USB Type-B
C Pulsante di accensione	L Pulsante luce di lettura
D Pulsante incremento/DX	M Porte COM
E Pulsante SX/Decremento	N Luce di lettura
F Pulsante Menu/Enter	O Entrata HDMI
G Pulsante Exit/Return	P USB 3.0
H Altoparlanti	Q USB Type-B per connessione touchscreen
I Uscite DC (non presenti)	R Wi-Fi antenna

Pulizia dello schermo

- Per pulire il touchscreen è possibile utilizzare una soluzione detergente per schermi che non contenga alcol e non sia abrasiva.
- Si consiglia la pulizia con un panno in microfibra.
- Distribuire la soluzione sul panno e poi pulire il touchscreen.

Pulizia della scocca antimicrobica

- Utilizzare un panno morbido/non abrasivo inumidito con acqua per pulire l'involucro
- Se si utilizza un detergente, si consiglia un liquido detergente privo di alcol e di ossidi.
- Per evitare di graffiare il rivestimento antimicrobico, pulire delicatamente

Quartex

BOG110624 D172X ENG

Quartex Informatica
Uffici: Via Paolo Giovio 28 – 20144 Milano - Italy
Sede legale: Via G.B. Pirelli 9 – 20124 Milano - Italy
Telefono: + 39 02 4984998 web: www.quartex.it Mail: info@quartex.it
Copyright © 2023, DT Research, Inc. All Rights Reserved.

Quartex

Monitor di grado medicale alimentato a batteria



Guida operativa di base

722MQ301 / 724MQ301

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il monitor di grado medicale alimentato a batteria. Con un display da 22 o 24 pollici e batterie integrate opzionali, il monitor di grado medicale alimentato a batteria offre combinazioni ottimali di prestazioni e risparmio energetico. Con moduli point-of-care completamente integrati in un design elegante e salva spazio, il monitor di grado medico alimentato a batteria è la soluzione ottimale per migliorare il flusso di lavoro e il servizio, mentre si abbina a personal computer, controller integrati, micro PC o thin client.

Si prega di prendersi qualche minuto per leggere il contenuto di questo documento per assicurarsi che l'installazione e l'avvio procedano senza intoppi. Il monitor di grado medicale alimentato a batteria è pronto per l'uso appena estratto dalla scatola nella sua configurazione predefinita quando alimentato dalla fonte di alimentazione fornita. La seguente documentazione offre indicazioni sugli elementi hardware e sulle funzionalità del monitor. Fare riferimento al fornitore del dispositivo per informazioni relative al sistema operativo software o alle applicazioni software.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Un adattatore di alimentazione AC-DC con cavo
- Un cavo HDMI
- Un cavo USB 2.0 Type-B a Type-A per la connessione touchscreen
- Un cavo USB 3.0 Type-B a Type-A la connessione al sistema
- Due cavi di connessione Wi-Fi
- Tre batterie DR202 Li-ion (opzionali)
- Manuale operativo di base

PRECAUZIONI

- Prestare sempre attenzione quando si utilizza e si maneggia il Monitor di grado medicale alimentato a batteria
- Non smontare mai alcuna parte dell'involucro, poiché ciò annullerà la garanzia del prodotto monitor di grado medicale alimentato a batteria.
- Non utilizzare alcun adattatore AC/DC diverso da quello fornito con il dispositivo o da un ricambio acquistato presso il produttore.
- Nell'improbabile caso in cui siano presenti fumo, rumori anomali o odori strani, spegnere immediatamente il Monitor di Grado Medico a Batteria e scollegare tutte le fonti di alimentazione. Segnalare immediatamente il problema al fornitore del dispositivo.